


STERISEPT WIPES

Alkoholfreie Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten

- **frei von Alkoholen, Aldehyden, Phenolen und PHMB**
- **kombiniert Reinigung und Desinfektion**
- **gute Materialverträglichkeit**

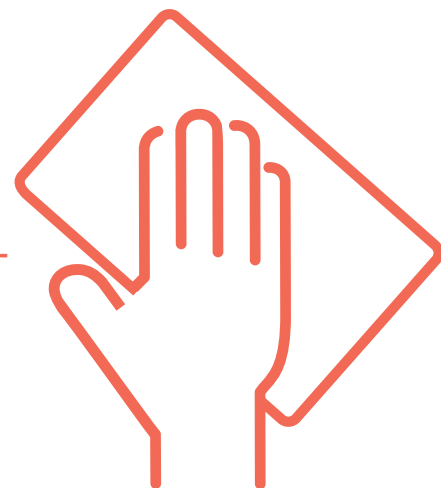

Sterisept Wipes sind alkoholfreie Schnelldesinfektionstücher für die invasive und nicht-invasive Medizin Geräte und alkoholempfindliche medizinische Oberflächen. Einwegtücher werden in einer praktischen und gebrauchsfertigen Verpackung geliefert. Sterisept Wipes enthalten keine Alkohole, Aldehyde, PHMB und sind geeignet für alle wasserbeständige Oberflächen im medizinischen Bereich. Aufgrund einer speziell entwickelten Rezeptur haben Sterisept Wipes eine gute Materialverträglichkeit mit gleichzeitig guten Reinigungseigenschaften.

Sterisept wipes haben ein breites Spektrum an bakterizider (inkl. MRSA, VRE, A.baumannii und K.pneumoniae), mykobakterizider (inkl. Mycobacterium avium und Mycobacterium terrae), fungizider und levurozider Wirkung. Das Produkt ist auch aktiv gegen Viren (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota und Noro) und Sporen (inkl. Clostridium difficile).

Sterisept Wipes haben eine gute Materialverträglichkeit bei Oberflächen und Instrumenten aus Edelstahl, Glas, Aluminium, Kupfer, Messing, Keramik, PVC, Gummi, Kunststoffen, Silikon, Acryl und Plexiglas.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Alkoholfreie, materialschonende Schnelldesinfektionstücher zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Geräten

- in Krankenhäusern, Laboren, Zahnarztpraxen, Rettungsfahrzeugen und anderen medizinischen Einrichtungen.
- für nicht-invasive Medizinprodukte und alkoholempfindliche Oberflächen.
- patientennahe Oberflächen wie Bettgestelle und Nachttische.
- Untersuchungsliegen und Matratzen.
- Operationstische und angrenzende Arbeitsflächen.
- in Rettungsfahrzeugen und in der Physiotherapie.
- Inkubatoren, Badewannen und Wägen
- Displays, Tastaturen und Bedienfelder

VERWENDUNG:

Sterisept Tücher sind anwendungsfertig. Öffnen Sie den Deckel der Dose und ziehen Sie das getränkte Tuch bis zur Perforation heraus. Um das Wischtuch abzureißen, ziehen Sie ruckartig und in einem kleinen Winkel daran. Schließen Sie nach dem Abreißen des Tuchs sofort den Deckel, um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

Wischen Sie die Oberfläche gründlich mit dem getränkten Tuch ab, um eine vollständige Benetzung sicherzustellen. Die Kontaktzeit beträgt mindestens 60 Sekunden oder je nach erforderlicher Wirksamkeit (siehe Tabelle).

Bei hoher organischer Belastung der Oberflächen, durch Blut und Sekrete, entfernen Sie zuerst mit dem ersten Tuch diese Verschmutzungen und benutzen Sie ein zweites Tuch für die Desinfektion.

Sterisept Wipes sind ein perfektes Produkt für die schnelle Desinfektion von medizinischen Geräten und Geräten, es eignet sich auch gut für Oberflächen wie patientennahe Oberflächen, Untersuchungsliegen, Physiotherapie Matratzen, Operationstische, Patientenstühle, Rollstühle, Liegen, Tablett und Wagen

MIKROBIOLOGIE:

WIRKSAMKEIT	TESTMETHODE	KONTAKTZEIT
Bakterizid (inkl. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Hefetötend	EN13624, EN13697	1 min
Bakterizid und levurozid	EN16615	1 min
Alle behüllten Viren	EN14476	0,5 min
Rotaviren, Noroviren	EN14476	0,5 min
Mykobakterizid	EN14348	5 min
Aspergillus brasiliensis	EN13624	10 min
Clostridium difficile	EN13704	15 min

Registriert in der Staatlichen Agentur für Arzneimittel, Fakultät für Medizinprodukte. Besitzt CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie über Medizinprodukte (MDD).

ZUTATEN:

100 g Produkt enthalten Wirkstoffe: Didecyl-Dimethyl-Ammoniumchlorid (DDAC) 0,45 g; N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,45 g

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Inhalt und/oder Behälter gemäß den Vorschriften für gefährliche Abfälle bzw. Verpackungen und Verpackungsabfälle entsorgen

VERPACKUNG:



100 Stück Eimer
16x20cm Tücher



120 Stück Eimer
20x20cm Tücher



200 Stück Eimer
20x20cm Tücher



AS Chemi-Pharm
Tänassilmattee 11, Harju maakond, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

IMPORTEUR:
Multiwork & Multitrade GmbH
Urgen 65b, 6500 Fließ
www.multiwork.at - office@multiwork.at