

BACTICID AF

ALKOHOLBASIERTES SCHNELLDÉSINFEKTIONS- MITTEL FÜR MEDIZINPRODUKTE

Bactacid AF ist ein Schnelldesinfektionsmittel auf Ethanolbasis für nicht-invasive Medizinprodukte und alkoholbeständige Oberflächen. Das perfekte Produkt bei höheren Hygieneanforderungen, die eine schnelle und regelmäßige Flächendesinfektion erfordern. Das Produkt wird als fertige Lösung geliefert, die sehr einfach zu verwenden ist. Es enthält keine Aldehyde, Duft- und Farbstoffe und ist für alle alkoholbeständigen Oberflächen geeignet



Bactacid AF hat ein breites Spektrum an bakterizider (inkl. MRSA, VRE), mykobakterizider (inkl. Mycobacterium avium und Mycobacterium terrae), voll viruzider (inkl. aller behüllten Viren, Rota, Adeno, Noro, Polio), fungizider und levurozider Wirkung. Bacticide AF ist dermatologisch getestet.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Oberflächen, bei denen kurze Einwirkzeiten erforderlich sind, beispielsweise in folgenden Bereichen:

- Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen
- Operationssäle und Behandlungsräume
- Intensivstation
- In Unfall- und Notaufnahmen
- Dialyseabteilungen
- Hausarztpraxen, Erste-Hilfe-Stationen
- Krankenwagen
- Labore u Diagnostik.
- Zahnarztpraxen
- Für die häusliche Pflege des Patienten
- Lebensmittelindustrie und lebensmittelverarbeitende Bereiche
- Pharma- und Kosmetikindustrie

ANWENDUNG

BACTICID AF ist eine gebrauchsfertige Lösung und kann durch Wischen oder Sprühen auf Oberflächen aufgetragen werden.

Flächendesinfektion durch Wischen: Eine ausreichende Menge BACTICID AF auf ein geeignetes Einwegvlies geben und die Flächen abwischen.

Flächendesinfektion durch Sprühen: BACTICID AF aus mindestens 30 cm Entfernung auf Oberflächen sprühen und mit einem Tuch verteilen. Empfohlene Anwendung für schwer zugängliche Oberflächen.

Stellen Sie eine vollständige Abdeckung sicher. Zum Einwirken müssen die Oberflächen 30 Sekunden sichtbar befeuchtet bleiben

Bacticid AF ist ein wirksames Produkt zur schnellen Desinfektion von Oberflächen wie Operationstischen, Untersuchungen
Liegen, Tragen, Patientenstühle, Rollstühle, medizinische Geräte, Tablett, Wagen, Krankenhaus- und Entbindungsbetten. Bei unbekannter Oberflächentoleranz zunächst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Dieses Produkt ist nicht für Acryl- oder Plexiglas oder alkohollösliche Lacke geeignet.

MICROBIOLOGY:

Wirksamkeit	Konzentration	Kontaktzeit
Escherichia coli	gebrauchsfertig	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	gebrauchsfertig	30 sek
Staphylococcus aureus	gebrauchsfertig	30 sek
Enterococcus hirae	gebrauchsfertig	30 sek
Staphylococcus aureus MRSA	gebrauchsfertig	30 sek
Vancomycin-resistente	gebrauchsfertig	30 sek
Enterokokken (VRE)		
Canda albicans	gebrauchsfertig	30 sek
Mycobacterium terrae	gebrauchsfertig	30 sek
Mycobacterium avium	gebrauchsfertig	30 sek
Alle behüllten Viren (inkl. HI HBV, HCV, Vaccinia)	gebrauchsfertig	15 sek
Rotavirus	gebrauchsfertig	15 sek
Norovirus	gebrauchsfertig	15 sek
Adenovirus	gebrauchsfertig	30 sek
Poliovirus	gebrauchsfertig	120 sek

BACTICID AF wurde gemäß den folgenden europäischen Standards getestet:

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Registriert in der Staatlichen Agentur für Arzneimittel, Fakultät für Medizinprodukte.
Es besitzt das CE-Zeichen gemäß der Richtlinie für Medizinprodukte (MDD).

INHALTSSTOFFE:

100 g enthalten: Ethanol 57 g, Isopropanol 6 g.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.

Behälter dicht geschlossen halten. Schutzhandschuhe tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl aufbewahren. Inhalt und/oder Behälter gemäß den Vorschriften für gefährliche Abfälle bzw. Verpackungen und Verpackungsabfälle entsorgen.


VERPACKUNG:



500ml
Sprühflasche



1000ml
Sprühflasche

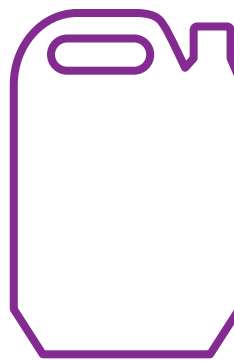

5000ml
Kanister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Harju maakond, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

IMPORTEUR:
Multiwork & Multitrade GmbH
Urgen 65b, 6500 Fließ
www.multiwork.at - office@multiwork.at